

Corega Power Max Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych miętowy 40 g

Cena: 22,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

Poczuj swobodę delektowania się ulubionymi potrawami. Corega Max Mocowanie + Osłona Miętowy zapewnia najsilniejsze mocowanie* oraz blokuje do 5x więcej drobinek jedzenia **przedostających się pod protezę podczas jedzenia**. Zapewnia mocowanie do 12 godzin, a precyzyjna końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładną odpowiednią ilość. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Osłona Miętowy nie zawiera cynku ani dodatkowych sztucznych barwników i od teraz występuje w nowym wariantcie smakowym: Miętowy. Ciesz się życiem bez zmartwień o protezę.

Sposób aplikacji kremu: 1. Protezę należy umyć i wysuszyć.

2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku na opakowaniu, niezbyt blisko jej krawędzi.

a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy

b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem. c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski

3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.

2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.

*w portfolio kremów do protez Corega

w porównaniu do braku stosowania kremu mocującego do protez zębowych

Składniki

kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, CI 73360, CI 15850

Dawkowanie

Instrukcja stosowania

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby następnym razem należy nałożyć większą ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony dla przedostających się drobinek jedzenia. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób aplikacji kremu

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
 - a. Proteza górna: nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy.
 - b. Proteza dolna: produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
 - c. Proteza częściowa: nałożyć 2 krótkie paski.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zamknąć zakrętką.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Infolinia dla konsumenta: 800 702 849
e-mail: mystory.pl@haleon.com