

Corega Power Max Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych neutralny smak 40 g

Cena: 22,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

Czy chcesz, aby Twoja proteza była wygodna w użytkowaniu? Corega Max Mocowanie + Komfort to podwójne działanie: Najsilniejsze Mocowanie*+ Najwyższy Komfort. Zastanawiasz się, jak to działa? Krem aktywuje się w kontakcie ze śliną i tworzy miękką warstwę amortyzującą, która pomaga absorbować nacisk protezy. Krem Corega Max Mocowanie + Komfort zaprojektowany został z myślą o komforcie i zabezpieczeniu protez częściowych i całkowitych przez cały dzień. Ciesz się komfortem noszenia protez – możesz zachować spokój i mieć pewność, że możesz być blisko przyjaciół i rodziny. Zapewnia mocowanie do 12 godzin, a precyzyjna końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładną odpowiednią ilość kremu. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Komfort nie zawiera cynku.

Sposób aplikacji kremu: 1. Protezę należy umyć i wysuszyć.

2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku na opakowaniu, niezbyt blisko jej krawędzi.

a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy

b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.

c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski

3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.

2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.

*w portfolio kremów do protez Corega
w porównaniu do braku stosowania kremu mocującego do protez zębowych

Składniki

guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, karbomer

Dawkowanie

Ważne: Instrukcja stosowania w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Zamknięcie kartonu jest zaklejone. Nie używać jeśli karton został otwarty.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Infolinia dla konsumenta: 800 702 849
e-mail: mystory.pl@haleon.com