

Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych super mocny neutralny smak 40 g

Cena: 21,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

Krem mocujący do protez zębowych Corega Super Mocny Neutralny Smak, stworzono z myślą o Twoim codziennym komforcie. Dzięki starannie opracowanej formule możesz zapomnieć o problemach związanych z noszeniem protezy, ponieważ krem mocuje ją w trzech kierunkach: góra - dół, przód - tył i na boki. Corega Super Mocny krem utrzymuje stabilność protezy aż do 12 godzin, dzięki czemu przez cały dzień możesz cieszyć się ulubionymi daniami bez żadnych obaw. Krem dodatkowo zapobiega dostawaniu się drobinek jedzenia pod płytkę protezy. Dzięki temu Twoje dziąsła są mniej narażone na podrażnienia, a Ty nie musisz martwić się o swój komfort niezależnie od sytuacji. Formuła kremu Corega Super Mocny nie zawiera cynku ani aromatów, dzięki czemu nie zmienia smaku oraz zapachu posiłków. Dodatkowo krem jest łatwy w usunięciu. Przekonaj się, jak łatwo odzyskać pewność siebie!

Składniki

kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna

Dawkowanie

Instrukcja stosowania:

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla bezpiecznego trzymania protezy. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Oczyszczyć protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie dokładnie opłukać wodą.

Ważne

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zakręcić.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Infolinia dla konsumenta: 800 702 849
e-mail: mystory.pl@haleon.com