

Dexoftyal MD Nawilżające i regenerujące krople do oczu 15 ml



Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

Dexoftyal MD nawilżająco – regenerujące krople do oczu
wyrób medyczny
duża i miękka butelka – 15 ml

Dexoftyal MD - szybka i długotrwała ulga dla suchych i zmęczonych oczu
Dexoftyal MD - możliwość aplikacji bezpośrednio na soczewki
Dexoftyal MD - wygodna i precyzyjna aplikacja kropli – duża i miękka butelka (15 ml)

Dexoftyal MD - wyjątkowe połączenie dekspantenolu i Hydraflex:

- wspiera regenerację,
- długotrwanie nawilża,
- chroni powierzchnię oka.

Dexoftyal MD pozwala na ograniczenie dolegliwości oczu, takich jak:

- suchość,
- zmęczenie,
- pieczenie,
- podrażnienie,
- zaczerwienienie.

Dexoftyal MD łagodzi objawy suchości oczu, które mogą być wywołane przez czynniki, takie jak:

- długotrwała praca przed ekranem komputera, tabletu,
- długotrwałe patrzenia w ekran telewizora,
- noszenie soczewek kontaktowych,

- prowadzenie samochodu,
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

Dexoftyal MD to jałowe, lepkie, przezroczyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5. Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym HydraFlexu film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej ochrona. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Dexoftyal MD chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości i w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane. Dexoftyal MD może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

Zastosowanie: Podrażnienie lub pieczenie oczu, a także ich zaczerwienienie i uczucie zmęczenia, które mogą być wywołane przez czynniki typu: podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych; długotrwała praca przed monitorem komputerowym lub długotrwałe prowadzenie pojazdów; przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz czynniki zewnętrzne jak wiatr, zanieczyszczenie powietrza lub wody.

Krople mogą być stosowane w trakcie noszenia soczewek kontaktowych.

Skład: Dekspantenol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%; Poliheksanid 0,0001%

Sposób stosowania: DEXOFTYAL MD można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

A: Bezpośrednio do oczu: (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować) – przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół – posługując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka! – zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrużyć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych: – ułożyć soczewkę na środkowym palcu; – nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka; – zamrużyć okiem 2 lub 3 razy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia: Nie stosować razem z lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia: Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia. Nie stosować po terminie ważności. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C. Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów lub podrażnienia, należy skontaktować się ze specjalistą.

Działania uboczne: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu DEXOFTYAL MD.

Opakowanie: 15 ml DEXOFTYAL MD

Producent: TEGE Pharma B.V.

Podmiot prowadzący reklamę/ Dystrybutor: Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Składniki

dekspantenol 2 %, hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5 %, poliheksanid 0,0001 %

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 4 °C do 25 °C

Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

Numer serii i termin ważności na spodzie opakowania.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia:

Należy przeczytać instrukcję używania w celu zapoznania się z dalszymi ostrzeżeniami i sposobem użycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Działania uboczne: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu Dexoftyal MD.

Producent

Verco S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa