

Otrivin Wyrób medyczny aerozol do nosa oddychaj czysto dla dzieci 100 ml



Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

Twoje dziecko ma problemy z nosem spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, alergią lub infekcją? Sięgnij po Otrivin Oddychaj Czysto dla dzieci, naturalny i delikatny aerozol do nosa, który pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nosa jako filtra chroniącego zdrowie Twojego dziecka. Otrivin to naturalne rozwiązanie na zatłakany nos, zawiera tylko izotoniczną wodę morską. Aerozol zmniejsza niedrożność nosa poprzez oczyszczanie go i wyplukiwanie z jamy nosowej zanieczyszczeń, alergenów i nadmiaru śluzu. Zmniejsza jego niedrożność poprzez oczyszczanie go i wyplukiwanie z jamy nosowej zanieczyszczeń, alergenów i nadmiaru śluzu. Otrivin do nosa działa także kojąco i nawilżająco na wysuszoną lub podrażnioną błonę śluzową nosa. Sprawdź jak łatwo pomóc dziecku pozbyć się kataru! Aplikator Otrivin Oddychaj Czysto został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach, dlatego ma pierścień, który zabezpiecza przed zbyt głębokim włożeniem końcówki do małego noska. Jest łatwy w użyciu i można go stosować codziennie już od 2. tygodnia życia, dzięki czemu każdego dnia Twoje dziecko może cieszyć się lepszym samopoczuciem i komfortem oddychania.

Składniki

woda morską i woda oczyszczona

Dawkowanie

Dawkowanie

Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Przed użyciem u niemowlęcia poniżej 2 tygodnia życia należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt stosuje się zazwyczaj 1-2 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

W razie potrzeby można stosować tak często, jak to konieczne.

Dzieci poniżej 11 roku życia powinny stosować Otrivin Oddychaj Czysto dla dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawne mogą wymagać pomocy osoby dorosłej podczas stosowania produktu.

Ze względów higienicznych, i w celu uniknięcia zanieczyszczenia produktu, opakowanie aerozolu do nosa powinno być używane tylko przez jedną osobę.

Przechowywanie

Nie zamrażać.

Przechowywać w temperaturze 0°C do 30°C.

Przeciwwskazania

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym pudełku.

Ostrzeżenie

Zawartość pod ciśnieniem: chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.

Nie przekłuwać ani nie poddawać spaleni, nawet po wykorzystaniu.

Opakowanie pod ciśnieniem: Może wybuchnąć pod wpływem gorąca. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła/ iskier/płomieni/ gorących powierzchni. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Uwaga: przed zastosowaniem wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania.

Nie stosować w razie uczulenia na którykolwiek ze składników (patrz lista składników).

Po każdym użyciu oczyścić końcówkę dozownika pod gorącą bieżącą wodą, dokładnie osuszyć czystą chusteczką i nałożyć nasadkę ochronną. Umyć dozownik gorącą wodą. Nie stosować środków chemicznych, środków do dezynfekcji ani płynu do mycia naczyń.

Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej.

Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować produktu, który został uszkodzony lub zniszczony.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa,

Infolinia dla konsumenta: 800 702 849

e-mail: mystory.pl@haleon.com

Galeria




Odpowiednie dla dzieci
już od 2. tygodnia życia

HAL/OT/12/0001




Delikatnie oczyszcza
i udrażnia jamę nosową

HAL/OT/12/0002

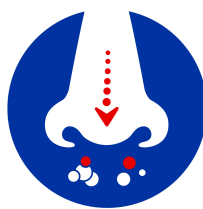

Nawilża błonę
śluzową nosa

HAL/OT/12/0003

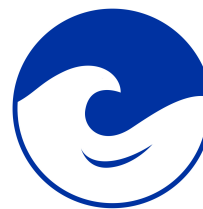

Zawiera izotoniczny
roztwór wody morskiej

HAL/OT/12/0004