

STERIMAR Hipertoniczny BABY woda morska 50 ml

Cena: 27,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MERCK SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Sterimar Hipertoniczny Baby - higiena nosa dla noworodków i niemowląt.

Od 1975 r. STERIMAR™, pionier higieny nosa, wykorzystuje swoją wiedzę na temat morza i jego naturalnych zasobów, aby dbać o zdrowie nosa.



STÉRIMAR™

HIPERTONICZNY
baby



- **Udrażnia nos**
- **Pomaga walczyć z przeziębieniem***



HIPERTONICZNY** od 3 miesiąca do 3 lat



- Delikatny niskociśnieniowy strumień wody, który nie podrażnia delikatnych błon śluzowych.
- Specjalna dysza wyposażona w kołnierz ochronny, który nie pozwoli wcisnąć końcówki zbyt głęboko w nos dziecka.

WSKAZANIA:

STERIMAR™ Baby Hipertoniczny jest to wyrób medyczny polecany dla dzieci w wieku od 3. miesiąca życia, aby:

- szybko udrożnić nos,
- usuwać gęstą wydzielinę,
- pomagać walczyć z przeziębieniem i zmniejszać ryzyko wtórnego zakażenia poprzez oczyszczanie jam nosowych*.

Oczyszczanie zatkanego nosa zwiększa skuteczność leków stosowanych miejscowo do nosa.

Jeśli błona śluzowa nosa jest podrażniona, podczas stosowania preparatu może pojawić się uczucie łaskotania.

Preparaty STERIMAR™ są wykorzystywane w rehabilitacji oddechowej w trakcie zapalenia oskrzelików.

ZALECANE STOSOWANIE:

Przy pierwszym użyciu należy jeden raz rozpylić preparat w powietrzu, aby uruchomić system.

- W celu głębszego oczyszczenia jam nosowych:

Ułożyć w pozycji leżącej dziecko w wieku do 2 lat, albo w pozycji siedzącej dziecko w wieku powyżej 2. Przechylić głowę dziecka na bok, delikatnie umieścić końcówkę aplikatora w górnej części otworu nosowego.

Naciskać podstawę aplikatora przez około 2 sekundy. Pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął przez drugi otwór nosowy, a następnie wydmuchać nos. Jeśli to konieczne, powtórzyć czynność w drugim otworze nosowym.

Po każdym użyciu końcówkę aplikatora umyć wodą z mydłem i osuszyć.

- Stosować 2 do 6 razy dziennie lub częściej, aż do ustąpienia obrzęku błony śluzowej nosa.

Przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w przypadkach niedrożności nosa.

SKŁAD: STERIMAR™ Hipertoniczny Baby jest to hipertoniczny roztwór wody morskiej** zawierający stężenie soli wyższe niż stężenie w komórkach ludzkiego organizmu, dzięki czemu aktywnie udrażnia nos. Przefiltrowana, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, a dodatkowo zawiera miedź i mangan.

Pakowany w warunkach aseptycznych. Pojemnik pod ciśnieniem zawierający obojętny gaz (azot).

Roztwór znajduje się w pojemniku i nie ma kontaktu z azotem.

Producent: SOFIBEL-Laboratories Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 926886 Levallois-Perret Cedex-Francja. Reklama na zlecenie Biocodex Polska sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem. Wyrób medyczny. STERT/020/21

Dla każdego nosa w różnych sytuacjach...

Poznaj inne produkty z linii Sterimar™



SPRAWDŹ



SPRAWDŹ





SPRAWDŹ



SPRAWDŹ