

Zaspray Spray na powieki 10 ml



Cena: 47,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	-
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

ZASPRAY jest wskazany jako środek łagodzący i nawilżający suche oczy, szczególnie w przypadku alergii.

ZASPRAY to nawilżający i łagodzący spray na powieki, zawierający liposomowy roztwór na bazie kompleksu Per-Lip® (liposom 4% + ekstrakt z nasion perilli 0,5%) i hialuronian sodu.

ZASPRAY to sterylny roztwór bez konserwantów, dostępny w butelce wielodawkowej o pojemności 10 ml, wyposażonej w innowacyjny system końcówek zamykających APTAR® PLUS, który eliminuje potrzebę stosowania konserwantów i zapobiega skażeniu bakteryjnym kropli w trakcie leczenia.

Brak konserwantów pozwala na ochronę tkanek oka, a także zapobiega podrażnieniu oczu u użytkowników wrażliwych na konserwanty.

ZASPRAY to przyjemna i łatwa w użyciu alternatywa dla osób, które mają trudności ze stosowaniem kropli do oczu.

ZASPRAY łagodzi swędzenie, suchość, podrażnienie i zaczerwienienie oczu, powodując:

- uczucie świeżości i ochłody,
- łagodzenie objawów podrażnienia oczu,
- zapobieganie odwodnieniu powierzchni oka,
- ograniczenie parowania wody z powierzchni oka,
- przywrócenie naturalnej równowagi powierzchni oka i ustabilizowanie filmu łzowego, zaburzonego przez stres środowiskowy, tj.: alergeny, klimatyzację, wiatr, kurz, zanieczyszczenia, a także przez zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym noszeniem soczewek kontaktowych, pracą przed komputerem, niekorzystnymi warunkami oświetleniowymi, itp.

ZASPRAY może być stosowany jako uzupełnienie terapii przeciwhistaminowych.

ZASPRAY jest dobrze tolerowany przez powierzchnię oka.

Hialuronian sodu naturalnie występuje w oku. Poprawia stabilność filmu łzowego, utrzymuje nawilżenie i zapewnia ochronę powierzchni

oka.

Aerazol dostarcza do oka liposomy (składnik oleisty w postaci fosfolipidów), pomagając odbudować warstwę lipidową łez, tym samym niwelując niestabilność filmu łzowego, która powoduje suchość oczu, dzięki czemu łagodzi podrażnienie i dyskomfort związany z chorobami oczu.

Perilla to przeciwutleniacz, który pomaga przeciwdziałać stresowi oksydacyjnemu.

Połączone działanie kompleksu Per-Lip® (liposomy + perilla) i kwasu hialuronowego pomaga przywrócić i poprawić stabilność filmu łzowego, utrzymując prawidłowo nawilżoną powierzchnię oka.

Składniki

Per-Lip, hialuronian sodu, kwas borowy, tetraboran sodu dziesięciowodny, PEG 300, wersenian disodu dwuwodny, chlorek sodu, woda

Dawkowanie

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją znajdującą się w opakowaniu.

Stosować wyłącznie na zamknięte powieki.

Dawkowanie:

Zaleca się rozpylić produkt na zamknięte powieki (jedna lub dwie aplikacje), 3 do 4 razy dziennie przez 3 do 4 kolejnych dni.

Nie stosować dłużej niż przez 30 dni w sposób ciągły.

Nie jest wymagane żadne specjalne szkolenie, aby korzystać z ZASPRAY.

Zużyć w ciągu 90 dni od pierwszego użycia.

Ogólne zalecenia dotyczące stosowania:

1. Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce.
2. Zdejmij soczewki kontaktowe przed aplikacją produktu.
3. Trzymaj mocno butelkę kciukiem lub palcem wskazującym na dyszy i uważaj, aby nie zatkać palcem otworu dyszy. Trzymaj butelkę w odległości około 10 cm od oka.
4. Stosuj na zamknięte oko, naciskając energicznie na dyszę, umożliwiając prawidłowe rozpylenie roztworu.
5. W razie potrzeby powtórz na drugim oku.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników tego wyrobu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Thea Polska Sp. z o.o.,
ul. Cicha 7,
00-353 Warszawa